

## SREBRO KOLOIDALNE Ag10 Zatoki 15 ml



Cena: 12,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent	NELFARMA SP. Z O.O
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

**Właściwości**DOSKONAŁE WSPARCIE W TRAKCIE ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH I NIEŻYTU NOSAWyrób medyczny przeznaczony do stosowania wspomagająco w trakcie zapalenia zatok przynosowych i nieżyty nosa. Wyrób przeznaczony do terapii uzupełniającej. Nie zastępuje leczenia środkami farmakologicznymi.**Sposób użycia**Przed pierwszym zastosowaniem, należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone w instrukcji znajdującej się na opakowaniu produktu. Wyrób medyczny stosować zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi przez wytwórcę w instrukcji umieszczonej na opakowaniu wyrobu.Należy dokładnie oczyścić nos. Zdjąć ochronną nasadkę, rozpylić 1-2 dawki w powietrze. Następnie delikatnie wsunąć aplikator do pierwszego otworu nosowego. W przypadku osoby dorosłej zaaplikować 3 dawki. W przypadku dzieci rozpylić 2 dawki. W ten sam sposób powtórzyć aplikację w drugim otworze nosowym. Nie wsuwać aplikatora zbyt głęboko, aby nie doprowadzić do mechanicznego podrażnienia błony śluzowej nosa. Wyrób stosować 3 razy dziennie. Każdorazowo po użyciu należy oczyścić i osuszyć aplikator, następnie z powrotem nałożyć nasadkę ochronną.Wyrób zawiera do 10 ppm srebra.**Ważne**Do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Wyrób może być stosowany u dzieci nie dłużej niż 3-5 dni, u osób dorosłych nie dłużej niż 7-10 dni. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, w razie konieczności dłuższego użycia, zaostrzenia objawów lub w przypadku braku poprawy stanu zdrowia, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.**Składniki**woda dejonizowana, srebro koloidalne**Producent**Nelfarma Sp. z o.o.Rynek 2, 41-250 Czeladź