

## STERIMAR HIGIENA NOSA Fizjologiczny roztwór wody morskiej 50 ml



Cena: 15,90 PLN

### Opis słownikowy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Producent          | MERCK                    |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny leczniczy |

### Opis produktu

**Właściwości** STERIMAR HIGIENA NOSA Fizjologiczny roztwór wody morskiej 50 ml Przywraca naturalną wilgotność błony śluzowej nosa. Oczyszcza jamę nosową wypłukując zanieczyszczenia. Ułatwia oddychanie uwalniając nos od gęstej wydzieliny. Optymalny strumień umożliwia prawidłowe wypłukanie jamy nosa. **Sposób użycia** W celu higieny i nawilżenia błony śluzowej nosa: trzymając głowę prosto należy wprowadzić końcówkę aplikatora do nosa. Rozpylić STERIMAR™ raz lub dwa razy w każdym otworze nosowym. Pozwolić, aby nadmiar roztworu wypłynął z nosa, a następnie wydmuchać nos. W celu głębszego oczyszczenia jamy nosowych: przechylić głowę w jedną stronę, umieścić końcówkę aplikatora w górnej części otworu nosowego. Rozpylić STERIMAR jeden raz, ale przez dłuższą chwilę, od 2 do 3 sekund. Pozwolić, aby nadmiar roztworu wypłynął przez drugi otwór nosowy, a następnie wydmuchać nos. Po każdym użyciu końcówkę aplikatora umyć w gorącej wodzie i osuszyć. 2 do 6 aplikacji dziennie. **Ważne** Przeciwwskazania i środki ostrożności. Pojemnik pod ciśnieniem zawierający obojętny gaz (azot). Roztwór znajduje się w pojemniku wewnętrznym i nie ma kontaktu z azotem. **Składniki** Izotoniczny roztwór wody morskiej. Produkt naturalny, bogaty w pierwiastki śladowe i mikroelementy, bez konserwantów. Woda morska: 31,82 ml Woda oczyszczona do 100 ml Fizjologiczny roztwór wody morskiej zawierający stężenie soli zbliżone do stężenia w komórkach ludzkiego organizmu. Przefiltrowana, w 100% naturalna, i bez konserwantów. Zawiera pierwiastki śladowe jak cynk, miedź, mangan, żelazo, magnez, selen. Produkt jest pakowany w warunkach aseptycznych. **Producent** SOFIBEL LABORATOIRE FUMOUE