

SUTRICON KIDS plastry silikonowe na blizny 3cm x 7cm 5 sztuk

Cena: 58,99 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|----------------|
| Producent | VERCO |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Opis Silikonowe plastry Sutricon® poprawiają wygląd i elastyczność blizn – rozjaśniają, wygładzają i zmniejszą ich widoczność. Dzięki swoim właściwościom zapewniają odpowiedni poziom wilgotności tkanki bliznowatej. Niwelują również dyskomfort związany z tworzącą się blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia. **Wskazania:** Silikonowe plastry Sutricon® Kids stosowane są na blizny: • O małych powierzchniach • Po mniejszych oparzeniach i przerwaniu ciągłości skóry • Dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia • W celu zmniejszenia widoczności blizn świeżych i dojrzałych **Zalety produktu:** • Posiadają efekt tatuażu z zabawnymi zwierzątkami, • Łatwo dostosowują się do powierzchni skóry, • Aplikacja 1 dziennie i aktywne działanie przez 24 godziny, • Zabezpieczają przed powstawaniem blizn przerostowych i keloidów, • Zmniejszają widoczność blizny – rozjaśniają ją i wygładzają, • Niwelują napięcie oraz uczucie ciągnięcia i swędzenia, • Plastry silikonowe posiadają rekomendację Międzynarodowego Zespołu Ekspertów ds. Leczenia Blizn1 • Są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze **Sposób użycia** Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejść wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować silikonowe plastry Sutricon na blizny. W przypadku zastosowania plastra na bliznę znajdującą się w miejscu narażoną na rozciągnięcie (np. staw kolanowy, staw łokciowy) tak jak w przypadku innych produktów w postaci plastra, może nastąpić jego odklejenie i przemieszczenie. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z każdej strony i nakleić na bliznę. 1 plaster = 3 - 5 dni stosowania. Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć ponownie ten sam plaster. Długość terapii to średnio: • min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych • min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych **Składniki** Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa. **Producent** Podmiot odpowiedzialny: VERCO