

SUTRICON plastry silikonowe na blizny 3cm x 10cm 5 sztuk



Cena: 62,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 op. (5 szt.)
Postać	-
Producent	VERCO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisSilikonowe plastry Sutricon® poprawiają wygląd i elastyczność blizn – rozjaśniają, wygładzają i zmniejszą ich widoczność. Dzięki swoim właściwościom zapewniają odpowiedni poziom wilgotności tkanki bliznowatej. Niwelują również dyskomfort związany z tworzącą się blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia.
Wskazania:Silikonowe plastry Sutricon 3x10 cm stosowane są na blizny:• O małych powierzchniach• Po plastyce piersi• Po niewielkich zabiegach chirurgicznych (np. tyroidektomia)• Po operacjach laparoskopowych• Po mniejszych oparzeniach i stłuczeniach• Po usuwaniu znamion• Mogą być stosowane powyżej 6. miesiąca życia• Świeże i dojrzałe**Sposób użycia**Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejść wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować silikonowe plastry Sutricon na blizny.W przypadku zastosowania plastra na bliznę znajdującą się w miejscu narażoną na rozciągnięcie (np. staw kolanowy, staw łokciowy) tak jak w przypadku innych produktów w postaci plastra, może nastąpić jego odklejenie i przemieszczenie.Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z każdej strony i nakleić na bliznę. 1 plaster = 3 - 5 dni stosowania. Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć ponownie ten sam plaster. Długość terapii to średnio:• min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych• min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych**Skład**Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.