

SUTRICON Silikonowe plastry na blizny, 5 sztuk

Cena: 98,90 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	5szt.
Producent	VERCO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny

Opis produktu

OpisSUTRICON silikonowe plastry na blizny, 5 sztuk

Profilaktyka i leczenie **różnych rodzajów blizn**. Można stosować na wszystkie **powierzchnie skóry**. Dzięki swoim właściwościom zapewniają odpowiedni poziom **wilgotności tkanki bliznowatej**. Niwelują również dyskomfort związany z tworzącą się blizną, taki jak **ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia**.

Sutricon skutecznie **zmniejsza widoczność blizn**, poprawia ich wygląd - **rozjaśnia i wygładza** blizny oraz poprawia ich **elastyczność**. Silikonowe plastry na blizny to **innovacyjne i skuteczne** rozwiązanie w profilaktyce i leczeniu wszystkich rodzajów blizn. Łatwo dostosowują się do powierzchni skóry,

Zalety:

Aplikacja 1 dziennie i aktywne **działanie przez 24 godziny**, Zabezpieczają przed powstawaniem blizn **przerostowych i keloidów**, Zmniejszają **widoczność blizny** – rozjaśniają ją i wygładzają, Zmniejszają **napięcie** oraz uczucie **ciągnięcia i swędzenia**, Plastry silikonowe posiadają rekomendację Międzynarodowego Zespołu Ekspertów ds. Leczenia Blizn Są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze. **Sposób użycia** Przed użyciem należy dokładnie **oczyścić i osuszyć** bliznę. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z każdej strony i nakleić na bliznę. 1 plaster = 3 - 5 dni stosowania. Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć ponownie ten sam plaster. Długość terapii to średnio: min. 3 miesiące w przypadku **blizn świeżych** min. 6 miesięcy w przypadku **blizn starszych** **Składniki**

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

Ważne

Plastry Sutricon® nie mogą być stosowane na:

Rany otwarte Rany sączące Oparzenia Błony śluzowe **Producent**

VERCO