

SUTRISEPT Płyn na rany 1000 ml



Cena: 92,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1000 ml
Postać	-
Producent	VERCO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wskazania SutriSept® w Solution Płyn na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego oczyszczania, przemywania ran i oparzeń 1. i 2. stopnia. SutriSept® bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do oczyszczania oraz nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran. Jest on także odpowiedni do antyseptycznego oczyszczania, zmękczenia i usuwania wyschniętych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, bez powodowania wtórnego urazu. **Działanie** Zgodnie z najnowszymi (z 2020 roku) wytycznymi ekspertów SutriSept® rekomendowany jest jako pierwszy wybór w: 2,3: Odkazaniu ran· Oparzeniach· Ranach zainfekowanych· Ranach z biofilmem **Wskazania:** SutriSept Płyn na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:· Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany urazowe powstałe w wyniku przecięcia, rozdarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia itp.), rany chirurgiczne);· Zakażone i niezakażone rany przewlekłe (np. owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żyłne, odleżyny itp.);· Zakażone i niezakażone rany powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzenia 1. i 2. stopnia, oparzenia chemiczne itp.);· Rany spowodowane działaniem prądu elektrycznego;· Rany popromienne;· Miejsca wprowadzenia cewników urologicznych;· Pielęgnacja skóry w okolicy stomii, pielęgnacja przetok i ropni. SutriSept Płyn na rany odpowiedni także:· Do oczyszczania i pielęgnacji powierzchni rany przed założeniem opatrunku;· Do antyseptycznego oczyszczania, zmękczenia i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, gazików i wypełniaczy ran. **Zalety produktu:** Pierwszy wybór na rany i oparzenia 2· Zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie· Bezboleśnie oczyszcza i nawilża ranę· Nie szczypie, nie boli – nie zawiera alkoholu· Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego· Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania· Wygodny w użyciu atomizer rozpylający **Sposób użycia** Przed założeniem opatrunku: Krok 1 Całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept® Płyn na rany. Krok 2 Rany z głęboką i rozległą tkanką martwiczą należy przemywać przez 10 do 15 minut za pomocą w pełni namoczonego kompresu (przez założenie mokrego opatrunku). Krok 3 Aplikację należy powtarzać w zależności od stanu rany, bez żadnych ograniczeń czasowych. Krok 4 Płynu nie należy rozcieńczać! Na oczyszczoną ranę można zastosować wyrób medyczny SutriSept® w Gel Hydrożel na rany. Krok 5 Odpowiednio zabandażować ranę. Po założeniu opatrunku: Krok 1 Dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując SutriSept® w Solution Płyn na rany, odczekać ok. 5-10 minut, aż zmiękną, po czym ostrożnie usunąć je z rany. Krok 2 Namoczenie materiałów opatrunkowych płynem SutriSept® w Solution zapobiega ich przywieraniu do powierzchni rany i znacznie ułatwia zmianę opatrunku. Krok 3 SutriSept® w Solution Płyn na rany wykazują kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany. W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept® w Solution Płyn na rany, a następnie wypełnia

się produktem SutriSept® w Gel Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept® w Solution Płyn na rany. **Skład** Jedyne połączenie takich substancji jak: 0,1% PHMB (Poliheksanid), Poloksamer 188 1% PHMB – nowoczesna substancja antyseptyczna o szerokim spektrum działania Poloksamer 188 – niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran