

TERMOFOR EKO 2l, 1SZT



Cena: 18,19 PLN

Opis słownikowy

Producent	ALBERT POLSKA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Termofor wykonany z gumy naturalnej.

Instrukcja używania:

1. Napełnić powoli ciepłą wodą o temperaturze ok. 50°C do 3/4 objętości termoforu.
2. Podczas napełniania termofor trzymać za szyjkę w pozycji pionowej.
3. Wypuścić nadmiar powietrza pochylając termofor powoli nad płaską powierzchnią do momentu, aż w wylocie pojawi się woda.
4. Zakręcić korek i sprawdzić szczelność.
5. Dokręcenie korka siłą dłoni powinno być wystarczające.
6. Po użyciu wylać wodę i powiesić wlewem w dół do całkowitego wysuszenia.

Podmiot odpowiedzialny: ALBERT POLSKA SP. Z O.O.