

TERMOFOR GUMOWY 2 L ZYSKAJ ZDROWIE

Cena: 15,89 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis TERMOFOR GUMOWY 2 L ZYSKAJ ZDROWIE Termofor należy napełniać wodą do około 2/3 jego objętości. Podczas napełniania trzymać termofor w pozycji pionowej za otwór wlewowy, by uniknąć rozpryskiwania się wody. Usunąć nadmiar powietrza z termoforu poprzez jego ostrożne przechylenie, do czasu pojawienia się wody przy otworze wlewowym. Z użyciem korka zakręcić termofor na tyle mocno i dokładnie, by uniemożliwić wyciekanie wody. Po użyciu odkręcić korek, wylać wodę, a następnie pozostawić otwarty termofor wlewem w dół, do całkowitego wysuszenia. **Ważne ŚRODKI OSTROŻNOŚCI** Zawsze sprawdzać szczelność przed użyciem. Nie należy używać gotującej się (wrzącej) wody do napełniania termoforu. Używanie ciepłej wody bezpośrednio z sieci miejskiej (centralnego ogrzewania) może spowodować skrócenie żywotności wyrobu. Termofor napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia. Unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą. Nie umieszczać termoforu w kuchenke mikrofalowej. Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Termofor zawiera naturalną gumę.