

TERMOFOR GUMOWY z pokrowcem 2 L ZYSKAJ ZDROWIE

Cena: 19,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis TERMOFOR GUMOWY z pokrowcem 2 L ZYSKAJ ZDROWIE Przeznaczony do miejscowego ogrzewania ciała, wspomagająco przy łagodzeniu różnych dolegliwości bólowych, stresu czy rozluźnianiu napiętych mięśni. **Sposób użycia** Termofor należy napełniać wodą do około 2/3 jego objętości. Podczas napełniania trzymać termofor w pozycji pionowej za otwór wlewowy, by uniknąć rozpryskiwania się wody. Usunąć nadmiar powietrza z termoforu poprzez jego ostrożne przechylenie, do czasu pojawienia się wody przy otworze wlewowym. Z użyciem korka zakręcić termofor na tyle mocno i dokładnie, by uniemożliwić wyciekanie wody. Założyć pokrowiec. Po użyciu zdjąć pokrowiec, odkręcić korek, wylać wodę, a następnie pozostawić otwarty termofor wlewem w dół, do całkowitego wysuszenia. **Ważne** Ostrzeżenia:

Zawsze sprawdzać szczelność przed użyciem.

Nie należy używać gotującej się (wrzącej) wody do napełniania termoforu.

Używanie ciepłej wody bezpośrednio z sieci miejskiej (centralnego ogrzewania) może spowodować skrócenie żywotności wyrobu.

Termofor napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia.

Unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą.

Nie umieszczać termoforu w kuchenke mikrofalowej.

Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej.

Termofor zawiera naturalną gumę.

