

TERMOFOR z pestek wiśni w pokrowcu RÓŻOWY APTEO

Cena: 14,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisTERMOFOR z pestek wiśni w pokrowcu RÓŻOWY APTEOtermofor z pestek wiśni wykonany jest z naturalnych surowców, pestek wiśni z polskich upraw umieszczonych w pokrowcu ze 100-procentowej bawełny. Wyrób służy do miejscowego schładzania lub rozgrzewania ciała.**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**Stosowany na zimno: przynosi ulgę w przypadku zwichnięć, guzów, bólów głowy, migren, ukąszeń insektów, lekkich poparzeń. Stosowany na ciepło: przynosi ulgę w przypadku kolek pokarmowych u niemowląt, dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśni i stawów, poprawia krążenie krwi i działa relaksacyjnie, może być stosowany przez matki karmiące do rozgrzewania piersi. **Sposób użycia**termofor należy schładzać i rozgrzewać bez pokrowca! Jako zimny okład: • umieścić termofor w zamrażarce na ok. 30-60 minut. Jako ciepły okład: • umieścić termofor w mikrofalówce o mocy 300-600 W na maks. 1 minutą, • umieścić termofor w piekarniku rozgrzanym do 120°C na ok. 4 minuty, • umieścić termofor na grzejniku (kaloryferze), aż będzie wystarczająco podgrzany i ciepły. **STOSOWANIE PRODUKTU**Gotowy do użycia wyrób włożyć w pokrowiec i przyłożyć do miejsca ciała wymagającego oziębienia lub rozgrzania. Wyrób będzie utrzymywał temperaturę do 30 minut w zależności od wielkości termoforu i temperatury otoczenia. Należy zachować powyższe informacje do kolejnego użycia termoforu.