

## APTEO Termofor z pokrowcem, 2L



Cena: 30,51 PLN

### Opis słownikowy

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dawka              | -                          |
| Opakowanie         | 1 szt.                     |
| Postać             | -                          |
| Producent          | SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny        |
| Substancja czynna  | -                          |

### Opis produktu

#### Opis APTEO Termofor z pokrowcem, 2L

Termofor z pokrowcem, stosuje się w celach profilaktyczno-leczniczych, do miejscowego ogrzewania ciała.

**Sposób użycia:** Sprawdzić szczelność przed użyciem. Nie należy używać wrzącej wody do napełniania termoforu, gdyż może powodować to uszkodzenie termoforu. Termofor napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia. Nie umieszczać termoforu w kuchence mikrofalowej. Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi, a także u niemowląt. Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Unikać silnego nacisku (np. siadania na wyrobie), aby nie spowodować pęknięcia. Należy kontrolować powierzchnię termoforu podczas okresu użytkowania. W przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń należy zaprzestać jego stosowania. Nie należy stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na część ciała, która będzie miała kontakt z termoforem. W przypadku takiego kontaktu należy umyć termofor wodą z mydłem.

Termofor należy napełniać wodą do ok. 3/4 objętości. Napełniać termofor powoli w pozycji pionowej trzymając za otwór wlewowy, aby uniknąć rozpryskiwania się wody. Zakręcić termofor za pomocą korka, aby uniemożliwić wyciekanie wody. Po ok. 5-10 minutach termofor osiągnie maksymalną temperaturę. Po zakończeniu stosowania termoforu odkręcić korek, wylać wodę, a następnie pozostawić otwarty termofor wlewem w dół, do całkowitego wysuszenia.

Należy zachować powyższe informacje do kolejnego użycia termoforu.

**Importer:** Synoptis Industrial Sp. z o.o.

**Dystrybutor i Podmiot prowadzący reklamę:** Synoptis Pharma Sp. z o.o.