


Test ciążowy płytkowy BIOCANTO CARE

Cena: 9,90 PLN

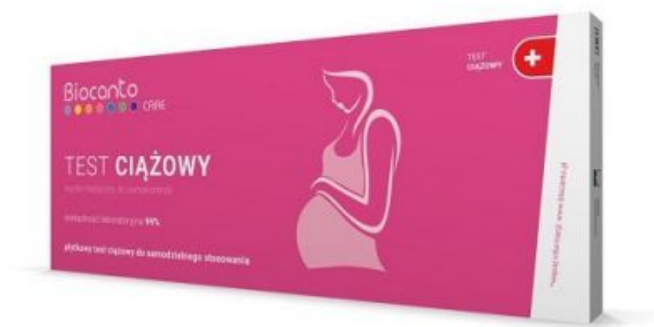

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|---------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 1 szt. |
| Postać | - |
| Producent | BIOCANTO SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Opis Test ciążowy płytkowy BIOCANTO CARE Test ciążowy oparty jest na wykrywaniu w moczu podwyższonego stężenia jednego z hormonów, ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, w skrócie HCG. **Sposób użycia** Odczekaj, aż płytka testowa i próbka moczu osiągną temperaturę pokojową (15-30°C). Nie otwieraj opakowania testu zanim nie będziesz gotowa do jego wykonania. 1. Wyjmij płytkę z zamkniętego woreczka, połóż na płaskiej, suchej, czystej powierzchni i użyj jak najszybciej. 2. Używając dołączonej pipety pobierz próbkę moczu z pojemnika, a następnie umieść 3 krople w otworze do zakraplania. 3. Poczekać, aż pojawi się różowy prążek. Odczytaj wynik w czasie do 5 minut. Nie odczytuj wyniku po upływie 5 minut.