

# TEST CIĄŻOWY Super Czuły PŁYTKOWY 1 sztuka DIATHER

Cena: 2,99 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Opis** WSKAZANIA TEST CIĄŻOWY Super Czuły PŁYTKOWY jest przeznaczony do wykrycia obecności hormonu hCG w moczu kobiety w celu potwierdzenia lub wykluczenia wczesnej ciąży. Test można wykonywać o każdej porze dnia, jednakże najwyższe stężenie hormonu odnotowuje się w moczu porannym oddanym po przebudzeniu. Badanie jest proste oraz szybkie w wykonaniu. Wynik w ciągu 5 minut! Z nami możesz cieszyć się dyskrecją i wygodą. Przygotuj się na nowy etap swojego życia dzięki naszemu testowi! WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU Spóźniająca się miesiączka współżycie bez zabezpieczenia CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU TEST CIĄŻOWY Super Czuły PŁYTKOWY to łatwe w użyciu i dokładne narzędzie diagnostyczne. Za pomocą testu sprawdzisz stężenie hormonu hCG, który pojawia się w moczu kobiet w ciąży. Nasz test wykrywa hormon hCG już przy stężeniu 10 mIU/ml. Do jego przeprowadzenia wystarczy próbka porannego moczu zebrana do suchego i czystego naczynia. Czułość diagnostyczna testu – 10 mIU/ml Szybki i precyzyjny Wynik w ciągu 5 minut Łatwy w wykonaniu Skuteczny **Sposób użycia** Krok 1: Przygotowanie próbki moczu: Test można wykonywać o każdej porze dnia, jednakże najwyższe stężenie hormonu odnotowuje się w moczu porannym oddanym po przebudzeniu. Nanieś trzy krople moczu na wyraźnie oznaczone miejsce na teście. Krok 2: Przeprowadzenie testu: W ciągu 5 minut odczytaj wynik.