


TEST Krew utajona w kale kasetkowy 1 sztuka DIATHER

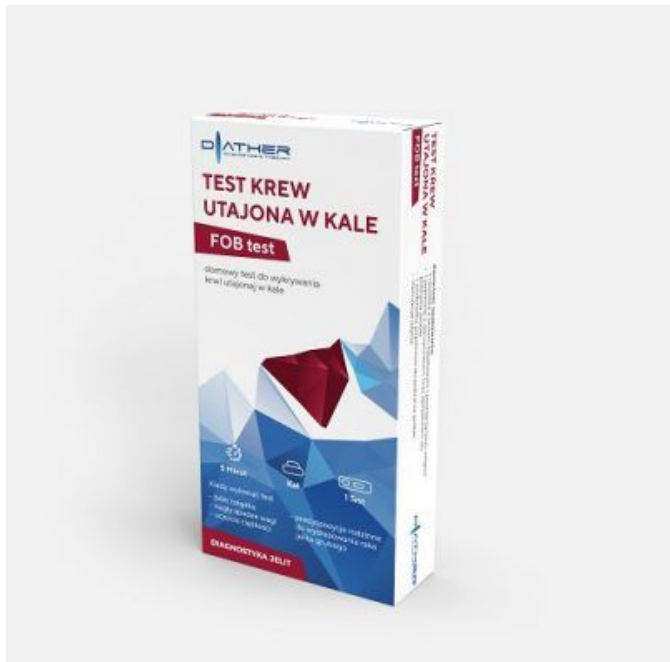

Cena: 12,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis TEST Krew utajona w kale kasetkowy 1 sztuka DIATHER TEST KREW UTAJONA W KALE (1 test) domowy, kasetkowy test do wykrywania krwi utajonej w kale ZASTOSOWANIE: Szybki test przeznaczony jest do diagnostyki różnych chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza jako badanie przesiewowe w kierunku wykluczenia nowotworów jelita grubego. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU TEST KREW UTAJONA W KALE przeznaczony jest do wykrywania utajonej krwi w próbce kału. Zasada działania testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciała. Test charakteryzuje się wysoką dokładnością wynoszącą 99,1%, wykrywa niewielkie ilości krwi, niewidocznej makroskopowo. Test może stanowić również pomoc w diagnostyce owrzodzeń, polipów oraz stanów zapalnych jelit. WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU bóle żołądka nagły spadek wagi uczucie ciężkości predyspozycje rodzinne do występowania raka jelita grubego STRESZCZENIE Badanie kału na krew utajoną (FOB: ang. fecal occult blood) jest nieinwazyjnym i prostym do wykonania samodzielnie przez pacjenta testem, który jest często wykonywany w diagnostyce różnych chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza jako badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Test może stanowić również pomoc w diagnostyce owrzodzeń, polipów czy stanów zapalnych jelit. Według międzynarodowych wytycznych przedstawionych przez US Preventive Services Task Force (USPSTF) u zdrowych osób obu płci powyżej 50 roku życia, zaleca się raz w roku wykonywanie przesiewowych badań w kierunku raka jelita grubego za pomocą testów FOB. TEST KREW UTAJONA W KALE jest domowym szybkim testem przeznaczonym do wykrywania już niewielkich ilości krwi, niewidocznej makroskopowo. Zasada działania testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciała. Przeciwciała, naniesione na membranę testu w czasie produkcji, reagują z hemoglobina pochodzącą z krwi obecnej w badanej próbce kału. Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych linii na membranie kasety testowej w czasie 5 minut. Na wynik testu nie wpływa dieta. OPAKOWANIE ZAWIERA 1 saszetkę z testem kasetkowym 1 pojemnik z odczynnikami oraz aplikatorem do pobrania próbki 1 podkładka papierowa do pobrania próbki instrukcja użycia. - Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE. - Posiada deklarację zgodności UE. - Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.