


TEST LH Owulacyjny strumieniowy 5 sztuk DOMOWE LABORATORIUM

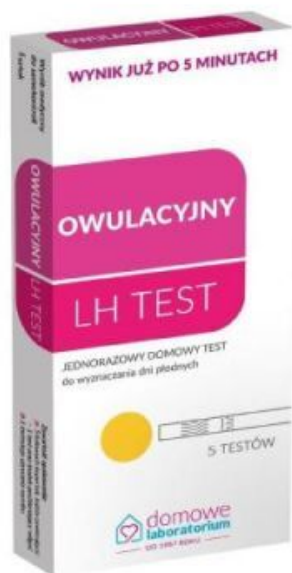

Cena: 21,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis. Jest to w pełni profesjonalny, diagnostyczny test paskowy do domowego użytku, wykrywający tzw. pik LH, czyli nagły skok stężenia hormonu luteinizującego w moczu kobiety (minimum 30 mIU/ml), poprzedzający owulację, który wyznacza najdoskonalszy moment na poczęcie w całym cyklu miesięcznym kobiety. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu najbliższe 24-36 godzin możemy wykorzystać na staranie się o swoje dziecko, ponieważ właśnie wtedy mamy największe szanse na zapłodnienie. Samo przeprowadzenie testu jest naprawdę proste i błyskawiczne. Musimy jedynie pobrać próbkę moczu do suchego i czystego pojemnika, a następnie zanurzyć w nim pasek testowy. Wyniki otrzymujemy po 5 minutach. Na ich odczytanie mamy jednak niewiele czasu, najlepiej jest to zrobić w ciągu jednej minuty, ponieważ później stają się one niewiarygodne. Dlatego warto na czas testu zaopatrzyć się w zegarek. Do analizy nie używamy pierwszego moczu porannego. Na 2 godziny przed badaniem nie powinno się również przyjmować żadnych płynów. Wszystko to może spowodować przekłamanie wyników. Przed zrobieniem testu owulacyjnego konieczne należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Powyższe opakowanie zawiera aż 5 testów LH, umożliwiających przeprowadzenie 5 niezależnych badań. LH TEST należy przeprowadzać zawsze o tej samej godzinie, a jego wyniki zapisywać. Dzięki temu stworzymy kalendarz dni płodnych, który ułatwi nam staranie się o wymarzone dziecko. Skład opakowania: 5 foliowych szczelnie zamkniętych kopertek, w każdej znajdują się: 1 test strumieniowy i 1 środek pochłaniający wilgoć 1 instrukcję używania wyrobu. Przed wykonaniem badania należy przygotować papierowy ręcznik i zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu. Materiał do badania: próbka moczu. Czas oczekiwania na wynik: Wynik testu odczytujemy po upływie 5 minut.