

## TEST Multi narkotykowy do wykrywania 10 narkotyków w moczu SamSięZbadaj.pl



Cena: 19,99 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	INTEGRA DIAGNOSTIC SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** Jest to niezwykle przydatne narzędzie diagnostyczne do zastosowania w warunkach domowych, które pozwala znaleźć ślady zażycia najbardziej popularnych narkotyków, takich jak amfetamina, heroina, kokaina, morfina, marihuana i haszysz. Wyrób do samokontroli, do wykonania w domu. Przeprowadzenie testu jest proste. Wynik testu już po 5 min. Wysoka jakość produktu. Prosty w użyciu. **Sposób użycia** Samo badanie za pomocą Multi TEST jest proste i powinno być wykonane na podstawie próbki świeżego moczu zebranego do suchego i czystego pojemnika. Pora jego pobrania nie jest istotna, należy natomiast pamiętać, że w przypadku niemożności natychmiastowego przeprowadzenia diagnozy, próbkę należy przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w temperaturze oscylującej wokół 2-8°C. W takim wypadku przed rozpoczęciem badania należy ją ogrzać. Zanim przeprowadzimy test, musimy pamiętać o tym, że: nie wolno zanurzać dolnej obudowy w próbce moczu, test powinien być zanurzony w próbce na tyle długo, aż w okienkach wynikowych pojawią się prążki kontrolne. Proces trwa zazwyczaj ok. 15 sekund. badany mocz nie może mieć bezpośredniej styczności z okienkami wynikowymi