

TEST na krew utajoną w kale TEMOFARM DATA WAŻNOŚCI 30.06.2024

Cena: 24,10 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	TEMOFARM SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opistest na krew utajoną – wyrób medyczny w postaci testu kasetkowego, przeznaczony do wykrywania obecności krwi w kale (FOB - ang. Fecal Occult Blood). Nawet śladowe ilości tego materiału mogą być związane z takimi chorobami jak np. wrzody, polipy, rak, choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), perforacje przewodu pokarmowego czy hemoroidy. Wyrób stanowi narzędzie w profilaktyce zachorowań na wymienione schorzenia przewodu pokarmowego. Zastosowanie Wykonanie testu polecane jest jako element profilaktyki dla osób po ukończonym 45. roku życia, a także w przypadku występowania takich objawów jak np.: bóle brzucha, anemia, biegunki, niezamierzona utrata masy ciała. **Sposób użycia** Skrócona instrukcja użycia: Pobrać próbkę kału przy pomocy dołączonego do zestawu arkusza do pobierania próbek. Odkręcić korek fiolki, zanurzyć patyczek do pobierania próbek w trzech różnych miejscach próbki i ponownie zakręcić korek. Odłamać końcówkę korka, uwalniając część wkraplającą. Odmierzyć trzy krople rozcieńczonej próbki do dedykowanego pola na kasetce. Odczekać 10 minut, a następnie odczytać wynik.