

TEST NARKO MULTI ślina 1 sztuka DIATHER

Cena: 32,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Test składa się z płytki testowej, próbnika oraz pojemnika na próbkę. W celu przeprowadzenia badania należy pobrać ślinę z ust za pomocą próbnika mającego postać specjalnej gąbki. Następnie ślinę musimy wycisnąć do pojemnika wyposażonego w nakrętkę z dozownikiem, z którego trzeba wprowadzić po 3 krople śliny, do każdego z dwóch pól reakcyjnych znajdujących się na płytce testowej. Obecność morfiny, heroiny i kokainy w ślinie wykrywana jest przez 12-24 godziny od zażycia narkotyków, amfetaminy 20-50 godzin, a marihuany i haszyszu ok. 14 godzin. Zastosowanie: To nowoczesny test domowego użytku stanowiący świetne narzędzie diagnostyczne. Dzięki niemu można szybko i wygodnie zbadać ślinę naszego dziecka czy bliskiej nam osoby, pod kątem obecności nielegalnych środków odurzających. Test narkotykowy ze śliny dostarcza informacji o stanie patologicznym spowodowanym używaniem narkotyków i tym samym jest pomocny w diagnozowaniu uzależnień od narkotyków. Test jest również pomocny w monitorowaniu działań terapeutycznych związanych z leczeniem tych uzależnień. **Sposób użycia** Test rozpocznij od pobrania śliny za pomocą specjalnego próbnika załączonego do zestawu. W tym celu włóż go do ust i energicznie pocieraj wnętrze jamy ustnej przez ok. 3 minuty (gąbka powinna być równomiernie nasączona). Nasączony próbnik umieść w pojemniku i energicznie dociśnij, aby wycisnąć jak najwięcej śliny. Nałóż nakrętkę i odchyl dozownik do pionu. Energicznie ściśnij dozownik i zaaplikuj po trzy krople śliny do dwóch okienek umiejscowionych na froncie testu. Poczekaj 10 minut i odczytaj wszystkie wyniki (interpretacja wyników po dłuższym czasie będzie nieprawidłowa i nie należy brać jej pod uwagę).