

TEST NIETOLERANCJA Gluten + Celiakia 1 sztuka DIATHER

Cena: 31,80 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER PETRUSIEWICZ SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis TEST NIETOLERANCJA Gluten + Celiakia 1 sztuka DIATHER Diather Test Nietolerancja Gluten + Celiakia domowy, kasetkowy test immunochromatograficzny przeznaczony do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynom (DGP). Wskazania do wykonania testu: wzdęcia i ból brzucha, przewlekła biegunka, wymioty, zaparcia, dla osób, które w najbliższej rodzinie mają krewnych z nietolerancją glutenu lub celiakią, osoby z cukrzycą typu 1. Właściwości: Diather Test Nietolerancja Gluten + Celiakia jest przeznaczony do wykrywania we krwi i surowicy przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (tTG), która jest głównym autoantygenem rozpoznawanym przez przeciwciała skierowane przeciwko endomysium mięśni gładkich oraz przeciwciał skierowanych przeciwko i gliadynom (DGP). W trakcie badania obecne we krwi przeciwciała klasy IgA (przeciwko tTG lub przeciwko gliadynie) połączą się z barwnymi cząsteczkami lateksu, opłaszczonymi przeciwciałami przeciwko przeciwciałom klasy IgA. Powstające koniugaty zbudowane z cząsteczek lateksu połączonych z przeciwciałami skierowanymi przeciwko IgA i z przeciwciałami klasy IgA, migrują wzdłuż membrany, zgodnie z siłami kapilarnymi do odpowiednich pól testowych (odpowiednio w polach T1 T2) znajdują się rekombinowane tTG i deaminowane peptydy gliadyny. Cząsteczki te wychwytyują koniugaty lateksowe utworzone w oparciu o obecne w próbce przeciwciała klasy IgA, skierowane przeciwko tTG i/lub przeciwko gliadynie w wyniku czego pojawiają się odpowiednie czerwone linie. Wyniki testu są interpretowane na podstawie obecności odpowiednich linii po 15 minutach. **Sposób użycia** Postępować zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. **CO OZNACZA WYNIK NEGATYWNY?** Wynik negatywny testu oznacza brak nietolerancji glutenu. Nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań. **CO OZNACZA WYNIK POZYTYWNY?** Wynik pozytywny testu oznacza podejrzenie nietolerancji glutenu. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zlecić wykonanie dodatkowych badań. **Ważne** Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE. - Posiada deklarację zgodności UE. - Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.