

THERMACARE Kompresy rozgrzewające na plecy i biodra 2 sztuki

Cena: 26,70 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

WłaściwościThermaCare to kompresy samorozgrzewające przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i stawów związanych z: napięciem mięśninadmiernym wysiłkiemprzeciążeniami nieprawidłową postawązapaleniem stawów. Kompresy rozgrzewające ThermaCare łagodzą ból do 16 godzin – 8 godzin podczas noszenia i do 8 godzin ulgi po zdjęciu kompresu. Działają bezpośrednio w miejscu bólu. Opatentowana technologia komórek ciepłych powoduje głębokie i równomierne na całej powierzchni wnikanie ciepła. Komórki ciepłe osiągają temperaturę ok. 40°C w ciągu 30 minut utrzymując stałą temperaturę przez okres do 8 godzin. Kompresy wytwarzają kojące, terapeutyczne ciepło, rozluźniając w ten sposób mięśnie i łagodząc ból. Pomagają poprawić ruchomość. Kompresy są wygodne w użyciu, nie wymagają podgrzewania. Rozmiar kompresów można łatwo dopasować dzięki elastycznemu pasowi (do obwodu maksymalnie 120 cm) i zapięciu na rzep. **Sposób użycia**Rozerwij saszetkę z kompresem bezpośrednio przed użyciem. Czas jaki kompres ThermaCare potrzebuje, aby osiągnąć temperaturę terapeutyczną może wynosić do 30 minut. Umieść kompres ThermaCare w miejscu bólu, ciemniejszymi komórkami ciepłymi skierowanymi w stronę skóry. Osoby w wieku 55 lat lub starsze powinny zakładać kompres ThermaCare na warstwę ubrania (lub materiału), tak aby kompres nie przylegał bezpośrednio do skóry. Nie stosować dłużej niż przez 8 godzin w okresie 24 godzin. Nie używać ponownie. **Ważne**Nie należy używać kompresu: w przypadku stwierdzenia wycieku zawartości komórek ciepłych lub jeśli kompres jest uszkodzony lub rozdarty jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę) na zmienioną chorobowo, podrażnioną lub uszkodzoną skórę w miejscu siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin u osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu na obszary ciała z zaburzonym czuciem temperatury z innymi produktami emitującymi ciepło (np. poduszkami grzewczymi, plastrami rozgrzewającymi itp.) u osób które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresu, w tym u dzieci, niemowląt i niektórych osób w podeszłym wieku. **Producent**ANGELINI

Galeria



ThermaCare
 EKSPERT W TERAPII CIEPŁEM

16 godzin ulgi w bólu

8 godzin łagodzenia bólu podczas noszenia kompresu i do 8 godzin ulgi po jego zdjęciu

opatentowana technologia komórek ciepłych dla głęboko przenikającego ciepła

nie zawiera substancji leczniczych

THCarecom09122

ThermaCare
 Komprese rozgrzewające

przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i (lub) stawów związanych z:

- napięciem mięśni
- nadmiernym wysiłkiem
- przeciążeniami
- nieprawidłową postawą
- zapaleniem stawów

THCarecom09122

ThermaCare
 Komprese rozgrzewające

bezpośrednio w miejscu bólu, w leczeniu bólu mięśniowo - szkieletowego w okolicy lędźwiowej

elastyczny pasek do obwodu max. 120 cm

zapięcie na rzep

Anatomicznie ukształtowany, duża powierzchnia ogrzewania, równomiernie rozłożone ciepło dzięki opatentowanej technologii komórek ciepłych.

THCarecom09122

ThermaCare
 Komprese rozgrzewające

wytwarzają kojące, terapeutyczne ciepło, rozluźniając w ten sposób mięśnie i skutecznie łagodząc ból

Komórki ciepłe osiągną temperaturę 40°C w ciągu 30 min utrzymując stałą temperaturę przez okres do 8 godzin.

THCarecom09122

Udowodniona skuteczność na bóle mięśni i stawów

Dolna część pleców i biodra Szyja i ramiona

wyrob medyczny THCarecom09122