

## UCHOLEK HIGIENA Spray do uszu 20 ml

Cena: 14,25 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 ml
Postać	-
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis

Dla Twojej rodziny

UCHOLEKHIGIENA

**Spray do uszu, 20 ml**

Preparat wspomagający higienę uszu

Wspiera leczenie stanów zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego

Wrób medyczny Ucholek HIGIENA to spray przeznaczony do rozpuszczania i usuwania zgromadzonej woskowiny.

Przeciwdziała powstaniu korków woskowinowych

Zapobiega zatkaniu uszu

Usuwa woskowinę z uszu

Umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu

ODPOWIEDNI DLA DZIECI I DOROSŁYCH

BOGATY SKŁAD OLEJKÓW

Kompleksowy skład

Oliwa z oliwek Olej ze słodkich migdałów Tokoferol

Polecany do stosowania przez osoby narażone na gromadzenie się woskowiny:

dla dzieci z tendencją do zalegania wody w kanale słuchowym z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego noszące aparaty słuchowe lub słuchawki

SPRAWDŹ TEŻ

UCHOLEK

Krople do uszu dla dzieci i dorosłych

20 ml

Zapoznaj się z kluczowymi informacjami na temat wyrobu medycznego Ucholek HIGIENA®

ULOTKA

Wskazania do stosowania

Sposób użycia

Przeciwwskazania

## Ostrzeżenia

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Skład

Produkt przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Zalecany do stosowania szczególnie u osób narażonych na gromadzenie woskowiny tj.: u dzieci, osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki, osób z tendencją do zalegania wody w kanale słuchowym lub z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.

Stosować do ucha 1 dawkę 3 razy dziennie, aż do rozpuszczenia woskowiny. Produkt aplikować bardzo ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia ucha spowodowanego niewłaściwym użyciem aplikatora.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej. Nie stosować po upływie terminu ważności. Należy zapobiegać przypadkowemu dostaniu się do oczu.

Wyrób medyczny może być stosowany u dzieci.

Oliwa z oliwek, olej ze słodkich migdałów, tokoferol

Sprawdź inne produktyz serii Ucholek

Ucholek® Spray do uszu

Ucholek FORTE® Krople

Ucholek FORTE® Spray

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

\* po uprzedniej konsultacji z lekarzem

PRODUCENT Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Prolab” sp.z o.o.

PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.

Uchoena KAEE APTE 171 4

**OpisUCHOLEK HIGIENA Spray do uszu 20 ml** dla osób dorosłych i dzieci suwa woskowinę z uszuzapobiega zatykaniu uszuprzeciwdziała powstawaniu korków woskowinowychumożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowinySpray do uszu „UCHOLEK HIGIENA” jest skutecznym wyrobem medycznym przeznaczonym do rozpuszczenia i

usuwania zgromadzonej woskowiny. Dzięki zawartej w produkcie naturalnej oliwie z oliwek rozpuszcza woskowinę i stopniowo usuwa ją z uszu na zewnątrz kanału słuchowego, wykorzystując do tego naturalny mechanizm oczyszczania ucha. Spray do uszu „UCHOLEK HIGIENA” może być stosowany zapobiegawczo u osób szczególnie narażonych na gromadzenie się woskowiny: u dzieci, u osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki, u osób z tendencją do zalegania wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.