


UNDOFEN KRIOTERAPIA aerozol na skórę 50 ml [12 aplikacji]

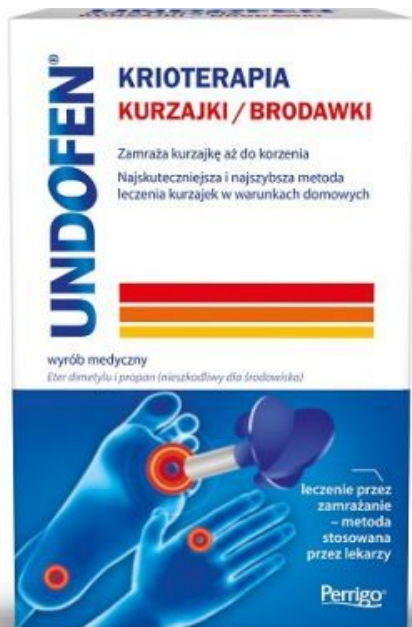

Cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Producent	OMEGA PHARMA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis UNDOFEN KRIOTERAPIA aerozol na skórę 50 ml (12 aplikacji) Wyrób medyczny Undofen Krioterapia to prosty i skuteczny sposób na kurczajki. Preparat pozwala pozbyć się narośli za pomocą tej samej metody zamrażania, której używają lekarze. Zapewnia natychmiastowe wymrażanie kurczajek aż do korzenia, w wyniku czego te stopniowo zanikają lub całkowicie odpadają po kilku dniach, odsłaniając zupełnie nowy i zdrowy naskórek. Wyrób medyczny Undofen Krioterapia uznawany jest za numer 1 w Polsce wśród domowych sposobów leczenia kurczajek. Undofen Krioterapia – korzyści stosowania Wyrób medyczny na kurczajki Undofen Krioterapia pozwala na samodzielne usuwanie kurczajek w zaciszu własnego domu, bez konieczności udawania się do lekarza – zazwyczaj już jeden zabieg umożliwi całkowite jej usunięcie. Wymrażanie kurczajek sprawia, że te odpadają po 10–14 dniach od zastosowania preparatu, a zestaw 12 jednorazowych aplikatorów zabezpiecza przed przenoszeniem wirusa HPV. Preparat na kurczajki można stosować u dzieci już od 4. roku życia. Odpowiedni do usuwania kurczajek na skórze dłoni i stóp. **Sposób użycia** Środek na brodawki Undofen Krioterapia usuwa różne rodzaje brodawek. O ile mniejsze kurczajki jest w stanie zlikwidować już po pierwszym zabiegu, o tyle duże mogą wymagać więcej niż jednego zastosowania preparatu. Jeżeli wymrażanie kurczajek nie powiedzie się za pierwszym razem i kurczajka nie zniknie po 10–14 dniach, zabieg można bezpiecznie powtórzyć. Ale uwaga! Aplikatora piankowego można użyć tylko raz, a następnie należy go wyrzucić. Preparat na kurczajki Undofen Krioterapia nie może być stosowany w miejscach, gdzie skóra jest cienka lub wrażliwa, takich jak: twarz, szyja, pachy, piersi, pośladki i narządy płciowe. Nie powinien być stosowany na podrażnioną skórę oraz obszary zainfekowane, zaczerwienione lub wykazujące jakiegokolwiek oznaki stanu zapalnego. Preparatu nie można stosować na owłosionych brodawkach, znamionach, ciemnych pieprzykach oraz na skórze o zmienionym kolorze. Przed leczeniem dobrze jest najpierw wymoczyć skórę w ciepłej wodzie przez około 5 minut, a następnie zetrzeć pilniczkiem zrogowaciały naskórek w okolicy brodawki. Aby wykonać zabieg, należy umieścić piankowy aplikator w uchwycie. Następnie wcisnąć trzymany za uchwyt aplikator do pojemnika z aerozolem na 3 sekundy i odczekać 20 sekund po nasyceniu pianki, aby dodatkowo zredukować temperaturę. Na koniec należy przyłożyć biały czubek aplikatora piankowego do brodawki. w przypadku brodawek zwykłych: przytrzymać aplikator przez 20 sekund w przypadku brodawek stóp: przytrzymać aplikator przez 40 sekund Po przyłożeniu aplikatora piankowego do brodawki skóra może stać się biała i mogą wystąpić lekkie ból i pieczenie, będące reakcją na zamrażanie. Po odsunięciu aplikatora prawidłowy kolor skóry powróci. Uczucie pieczenia i niewielkiego bólu natychmiast się zmniejszy. **Skład** Undofen Krioterapia to zestaw, na który składają się: pojemnik z aerozolem o poj. 50 ml, zawierający nieszkodliwą dla środowiska mieszkankę eteru dimetylowego i propanu CE 0344, 12 aplikatorów piankowych jednorazowego użytku (do 12 zastosowań), uchwyt wielokrotnego użytku na aplikator piankowy, pilniczek wielokrotnego użytku CEulotka informacyjna.