

URGO Elektrostymulator do ładowania, bóle pleców, bóle stawowe

Cena: 195,00 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	urządzenie
Producent	URGO SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis URGO TENS Elektrostymulator do ładowania + Wymienne nakładki żelowe: natychmiastowy efekt przeciwbólowy
Wskazania: bóle mięśniowe (opóźniona bolesność mięśni, przykurcze, bóle pleców, lumbago, kręcz karku itp.); bóle stawowe (choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, itp.); neuralgie (rwa kulszowa, rwa szyjno-barkowa, rwa udowa) po konsultacji z lekarzem; bóle urazowe (skręcenie, zapalenie ścięgien, naciągnięcie itp.) po konsultacji z lekarzem
Technologia medyczna TENS przynosi ulgę w bólu dzięki zastosowaniu prądu elektrycznego o specjalnie dobranym natężeniu. Jest to metoda niewymagająca stosowania leków, codziennie wykorzystywana w ośrodkach leczenia bólu. Niezależnie od dolegliwości, elektroterapia TENS nie leczy przyczyn bólu, ale zmniejsza lub usuwa ból mięśni i stawów. Prąd elektryczny jest przesyłany przez elektrody umieszczone na powierzchni skóry. Powoduje on elektryczne pobudzenie nerwów. Podwójny efekt redukcji bólu: **NATYCHMIASTOWE:** ograniczenie przesyłania sygnałów bólowych do rdzenia kręgowego, określone inaczej jako efekt „bramkowania”, **DŁUGOTRWAŁE:** zwiększenie wydzielania endorfin, naturalnych hormonów przeciwbólowych wytwarzanych przez mózg. Leczenie metodą elektroterapii umożliwia natychmiastową i długotrwałą ulgę w bólu. Wszystkie programy elektroterapii są skuteczne: zostały przetestowane naukowo, a technologia została zatwierdzona przez instytucje medyczne.
Sposób użycia Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie elektrostymulatora.
Ważne Przeciwwskazania i środki ostrożności: Nie nakładać: w okolicy serca, na klatkę piersiową, z przodu ani z boku szyi (tętnica szyjna, gardło), w okolicy genitaliów, na głowę. Nie stosować u osób: z wszczepionym urządzeniem (rozrusznik, pompa insulinowa, glukometr do monitorowania glikemii, defibrylator itp.), ze zmianami skórnymi na obszarach tych zmian (podrażniona skóra, wysypka skórna, rana pooperacyjna, świeża blizna, obecność zszywek, rana urazowa, owrzodzenie żyłne lub tętnicze, owrzodzenie cukrzycowe, oparzenia itp.), z ciężką niewydolnością żylną (żylaki, zapalenie żył, zapalenie żył głębokich, owrzodzenie żyłkowe) lub z zakrzepicą tętniczą na obszarach objętych schorzeniem, z upośledzoną wrażliwością skóry (niektórzy chorzy na cukrzyce, osoby w podeszłym wieku) na obszarach objętych schorzeniem, z chorobami nowotworowymi w obrębie zmian nowotworowych lub zakażonych lub w ich pobliżu, w ciąży na brzuch, w ciąży na plecy bez konsultacji z lekarzem, z epilepsją w obrębie głowy, szyi i ramion. Informacje dla użytkownika lub pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem: Szczegółowe informacje, w tym również ryzyko związane z zastosowaniem produktu URGO Elektrostymulator do ładowania, zostały opisane w ulotce dołączonej do opakowania.