

## URGO Na halluksy 5 plastrów



Cena: 16,30 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 plast.
Postać	plaster
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**URGO Na halluksy 5 plastrówOchrona halluksów. Do zastosowania w celu skutecznego zmniejszenia ucisku i zapobieganiu otarciom u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia (młodsze dzieci mogą stosować ten opatrunek pod nadzorem rodziców lub osób dorosłych).Opatrunki URGO na Halluksy z pogrubioną warstwą hydrokoloïdową działają jak druga skóra:skutecznie zmniejszają ucisk na bolące miejscaawarta w nich gliceryna działa nawilżająco i zmiękczaýco na odcisk i zrogowacenia przyspieszając gojeniechronią przed możliwymi otarciami i uciskiem,specjalny kształt opatrunku dopasowuje się do stopy, chroniąc halluksy przed otarciami**Sposób użycia**Oczyszczyć i osuszyć skórę. Należy się upewnić, że na halluksie nie ma żadnych zmian, rany ani zaczerwienienia.Zdjąć przezroczystą folię ochronną (strefa oznaczona strzałką).Ogrzać opatrunek w dłoniach, aby ułatwić jego formowanie.Zdjąć ochronną część ozdobną.Nałożyć opatrunek tak, aby część środkowa znalazła się na halluksie.Usunąć białe skrzydełka ochronne, przykleić opatrunek, wygładzając ostrożnie krawędzie i dociskając je, aby zwiększyć przyleganie.Opatrunek powinien zostać usunięty, kiedy zacznie się marszczyć.Opatrunek nie powinien zostawać na miejscu dłużej niż 2-3 dni. Jeśli nie odpadnie sam, należy go usunąć.**Ważne**PRZECIWWSKAZANIAPrzeciwwskazany w przypadku zakażonych ran. Przeciwwskazany w przypadku zapalenia tętnic kończyn dolnych. Przeciwwskazany w przypadku zakażonej stopy cukrzycowej.**Producent**DystrybutorLaboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa