

URGO Oparzenia i rany powierzchniowe duży format 4 sztuki



Cena: 27,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	4 szt.
Postać	opatr.
Producent	URGO SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisURGO plastry na oparzenia z unikalną technologią lipidokolooidalną - nie przywierają, przepuszczają powietrze. Dzięki warstwie ochronnej zbudowanej z poliestru i siateczce w technologii lipidokolooidalnej połączonej z elementami hydrokoloidowymi oraz wazeliną uśmierza ból i sprzyja gojeniu. Ponadto plaster nie przykleja się do rany i można go bezboleśnie zdjąć. Właściwości: 4 plastry rozmiar: 7 x 10 cm oparzenia pierwszego stopnia powierzchniowe oparzenia drugiego stopnia powierzchniowe rany Działanie plastrów URGO: szybko uśmierzają ból ułatwiają gojenie umożliwiają bezbolesne usuwanie przyklejają się do rany **Sposób użycia** 1. W przypadku wszystkich oparzeń: Oczyszczyć ranę środkiem antyseptycznym bez alkoholu. Następnie opłukać wodą lub roztworem soli fizjologicznej. 2. Ostrożnie osuszyć ranę sterylnym gazikiem. W przypadku oparzenia nigdy nie stosować środków antyseptycznych zawierających eozynę. 3. Zdjąć warstwę ochronną z plastra. Nałożyć na obszar przeznaczony do leczenia - o ile to możliwe, nie ruszać pęcherza, ponieważ chroni przed zakażeniem. Jeżeli pęcherz jest pęknięty, odkazić obszar. Nie usuwać martwej skóry, jeżeli sama nie odpada. 4. Stosuj od 5 do 6 dni, przy czym opatrunek należy zmienić po raz pierwszy po 24 godzinach, a następnie zmieniać co 48 godzin.