

URGO Opatrunek w sprayu 40 ml



Cena: 19,07 PLN

Opis słownikowy

Producent	URGO LABORATOIRES
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

WłaściwościURGO opatrunek w sprayu to oryginalna formuła będąca owocem prac badawczych Laboratoriów URGO. Wskazany do stosowania na rany, otarcia i zadrapania. Idealnie utrzymuje się na ranach w trudno dostępnych miejscach, takich jak kolana i łokcie. Po zastosowaniu przezroczysta, wodoodporna powłoka chroni ranę niczym druga skóra, optymalizuje proces gojenia. **CHRONI**GOIRANY POWIERZCHNIOWE **Sposób użycia**Preparat należy aplikować na oczyszczoną i osuszoną ranę z odległości 5-10 cm. Pozostawić na 1 minutę do momentu powstania ochronnej powłoki. Należy stosować tak często jak to konieczne. Opatrunek ulega samoistnemu wchłonięciu. **Ważne**PRZECIWSKAZANIAZe względu na brak badań, stosowanie produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie jest zalecane. **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**Nie należy stosować na rany zakażone, rany głębokie, sączące się, takie jak oparzenia. Nie należy stosować w obrębie twarzy. Nie należy wdychać oparów. Po zastosowaniu może powodować mrowienie. Należy unikać kontaktu z oczami. Działa drażniąco na oczy. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. W przypadku osób poniżej 16. roku życia produkt musi być aplikowany przez osobę dorosłą. W przypadku zatkania końcówki aplikatora przez utworzony film, należy go zdrapać w celu uzyskania lepszego rozpylania. **UWAGA**Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Chronić przed światłem słonecznym. Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie rozpylać na otwartym ogniu lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. **Producent**Producent: Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42, rue de Longvic – 21300 Chenôve - France **Dystrybutor**: URGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa