

URGO SURGIFIX Elastyczna siateczka opatrunkowa

Cena: 14,19 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisElastyczna siateczka opatrunkowa URGO Surgifix.

Zaleca się jej stosowanie przy bandażach zakładanych na **trudno dostępne i niewygodne** miejsca, pozwalając jednocześnie na zachowanie **pełnej swobody ruchów**. Stosowanie siatki opatrunkowej **pozwała skórze i ranie oddychać**, zmniejszając tym samym ryzyko oparzeń. Siateczka daje możliwość obserwacji procesu gojenia

Właściwości nie uciska rany i nie przykleja się do niej, jest idealna dla **delikatnej i wrażliwej skóry**, nie wywołuje podrażnień, nadaje się do prania i wielokrotnego użytku **bez utraty elastyczności**. **Sposób użycia**

1. Odmierz odpowiednią długość siateczki potrzebną do utrzymania opatrunku. 2. Przytnij nożyczkami. 3. Rozszerz siateczkę za pomocą dłoni. 4. Załóż opatrunek, wsuwając jedną, a następnie drugą dłoń. 5. Podwiń krawędzie na każdym końcu, zachowując odstęp kilku centymetrowy. 6. Aby zmienić opatrunek wystarczy unieść siateczkę dłonią. Uwaga: jeśli wycięcie jest niewystarczające lub niewygodnie dla przeprowadzenia kciuka, dla ułatwienia można wykonać jeszcze jedno lub dwa wycięcia do założenia siateczki. Uwaga ta dotyczy wszystkich zastosowań siateczki.

Składniki

Poliester 38%, Nylon 35%, Lateks 27%

Producent

Producent: FRA PRODUCTION SPA – Strada delle Poste 16 – 14010 Dusino San Michele AT, Włochy Dystrybutor: URGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa URGO/MIX/KON/202306/01 Oznakowanie CE0459