

## URGO Urgosterile opatrunek 20 cm x 9 cm 10 plastrów

Cena: 24,99 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	paski do zam.ran
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Właściwości**Ochrona i zabezpieczenie:ran powierzchniowych (otarcia, skaleczenia),szytych ran z niewielkim wysiękiem,ran pooperacyjnych.Ranę lub przecięcie uważa się za powierzchniowe, jeśli sięgają tylko warstwy skóry lub bezpośrednio powyżej tkanki podskórnej.W przypadku, gdy powierzchniowa rana przekroczy głębokość 3 cm, należy skonsultować się z lekarzem w ciągu 6 godzin po wypadku w celu ustalenia, czy ranę powinno się opatrzyć szwami lub poddać zabiegowi (zastosować specjalny klej chirurgiczny,...).**WŁAŚCIWOŚCI**Przepuszczający powietrze, umożliwia oddychanie rany i pozwala unikać maceracji.Optymalne utrzymanie, nie pozostawia warstwy klejącej na skórze.Sterylny opatrunek zmniejszający ryzyko infekcji.Z wysoką tolerancją skórą, łagodny dla skóry.Dzięki warstwie nieprzywierającej do rany, kompres, wchłania wysięki bez przywierania do rany.Przylegający z 4 stron, całkowicie chroni ranę.**Sposób użycia**Przed użyciem należy sprawdzić czy saszetka nie została naruszona.Ostrożnie oczyścić obszar, który ma być zabezpieczony i jego okolice.Wyjąć opatrunek z opakowania po wskazanej stronie i usunąć zakładkę ochronną.Nałożyć opatrunek tak, aby część środkowa opatrunku przykrywała całą ranę.Opatrunek powinien dobrze przylegać z 4 stron.Unikać naciągania opatrunku podczas aplikacji.Opatrunek należy wymieniać tak często, jak to konieczne.**WażneŚRODKI OSTROŻNOŚCI**w przypadku osób poniżej 16. roku życia, produkt musi być aplikowany przez osobę dorosłą. Sterylny opatrunek do jednorazowego użytku. Nie należy używać ponownie ani zmieniać ułożenia już zastosowanego opatrunku: ryzyko zakażenia i zmniejszenia skuteczności mocowania i utrzymania opatrunku w jednym miejscu. Nie sterylizować ponownie. Przed użyciem należy sprawdzić czy opakowanie bezpośrednie nie zostało naruszone. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Należy regularnie sprawdzać ranę i jej okolice, w celu wykrycia jakichkolwiek objawów zakażenia, takich jak ból, zaczerwienienie, obrzęk, nieprzyjemny zapach lub tworzenie się ropy. Nie stosować na głębokie rany nieopatrzone szwami, rany krwawiące lub z silnym wysiękiem.Każdy poważny incydent związany z produktem należy zgłaszać do wytwórcy, dystrybutora i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.**METODA UTYLIZACJI**Przez spalanie. Jeśli spalanie nie jest możliwe, usuwanie odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami środowiskowymi.**Składniki**Urgosterile jest sterylnym opatrunkiem samoprzylepnym, z rozciągliwego, białego materiału włókninowego, pokrytego masą samoprzylepną wraz z integralnym, chłonnym kompresem z włókniny, pokrytym warstwą nieprzywierającą do rany.Sterylny opatrunek (sterylizowano tlenkiem etylenu).**Producent**Producent: Laboratoire SYLAMED, 3 Square de Maubeuge, 75009, FranceDystrybutor: URGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

URGO/MIX/KON/202306/01

