

Zatoxin Rinse zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

Cena: 24,90 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Opakowanie | 12 sasz. (+ irygator) |
| Postać | pr.do p.roztw. |
| Producent | TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

OpisZatoxin Rinse zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

Zatoxin Rinse to wyrób medyczny służący do oczyszczania, przepłukiwania i udrażniania nosa oraz zatok przynosowych.

Zatoxin Rinse - zestaw podstawowy:

butelka do irygacji o max. poj. 300 ml, 12 saszetek z proszkiem do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok.

Każda saszetka dołączona do zestawu Zatoxin Rinse umożliwia uzyskanie roztworu chlorku sodu i dwuwęglanu sodu, który pozwala na dokładne oczyszczanie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcje. Dwuwęglan sodu zapewnia odpowiednio, lekko zasadowe pH roztworu. Składnik ten rozrzedza gęstą wydzielinę i sprzyja szybszemu usuwaniu zanieczyszczeń z jamy nosowej.

Wyrób medyczny Zatoxin Rinse nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową nosa i zatok. Zastosowanie hipertonicznego roztworu dodatkowo zmniejsza obrzęk błony śluzowej i uczucie ucisku w zatokach, ułatwiając oddychanie i usuwanie wydzieliny na zewnątrz.

Zatoxin Rinse jest wyrobem medycznym, który skutecznie można stosować w celu łagodzenia objawów chorób nosa i zatok, takich jak:

uczucie zatkanego nosa, zaleganie wydzieliny w jamach nosa i zatok, ucisk w okolicy nosa i zatok, suchość błony śluzowej nosa.

Unikalna konstrukcja butelki do irygacji umożliwia płukanie nosa i zatok w łatwy i kontrolowany sposób:

bez użycia dodatkowej siły (bez konieczności ściskania butelki), dostosowanie typu płukania (irygacji) do wieku pacjenta oraz poziomu

uciążliwości objawów. **ZATOXIN RINSE - WSKAZANIA:**

Zestaw do płukania nosa i zatok zaleca się stosować:

w zapaleniu zatok przynosowych, w nieżycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Zestaw jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie wpływa negatywnie na prowadzenie pojazdów i urządzeń mechanicznych.

Sposób użycia DAWKOWANIE I SPOSÓB PODANIA ZATOXIN RINSE:

Wyrób medyczny Zatoxin Rinse należy stosować zgodnie z instrukcją używania.

Dorośli i dzieci powyżej 4. roku życia. Dzieci mogą stosować zestaw jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w nieżycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok:

Dawkowanie: rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do irygacji.

W razie potrzeby, w przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa:

Dawkowanie: rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji.

Do przeprowadzenia płukania u osoby dorosłej należy użyć 120 ml roztworu na każdy otwór nosowy. W przypadku przeprowadzania płukania u dzieci należy użyć 60 ml roztworu na każdy otwór nosowy. Pozostałą część niewykorzystanego roztworu należy wylać.

Częstotliwość stosowania zestawu: płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

Ostrzeżenia: nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temperaturze poniżej 19°C) przez godzinę po płukaniu nosa i zatok. Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed snem. Po przeprowadzeniu płukania, zwłaszcza roztworem hipertonicznym w obrębie jamy nosowej może wystąpić delikatne uczucie pieczenia. Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu, a także, gdy którykolwiek z elementów zestawu uległ uszkodzeniu. Do płukania należy stosować tylko butelkę i saszetki załączone do zestawu. W celu zachowania higieny i uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest stosowanie jednej butelki przez jedną osobę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

SPOSÓB UŻYCIA WYROBU ZATOXIN RINSE: Otwórz torebkę zabezpieczającą i wyjmij wszystkie elementy butelki-irygatora. Przed rozpoczęciem korzystania z butelki-irygatora po raz pierwszy przepłukaj jego elementy pod bieżącą wodą. Wsyp zawartość 1 saszetki do butelki w celu przygotowania roztworu izotonicznego lub 2 saszetki w celu przygotowania roztworu hipertonicznego. Napełnij butelkę przegotowaną wodą (o temperaturze ciała ok. 36,6°C) do poziomu oznaczonego linią 240 ml. Dokładnie zakręć butelkę używając białej nakrętki i mieszaj roztwór przez potrząsanie butelką (zatkać palcem otwór dyszy) do całkowitego rozpuszczenia proszku w wodzie. Wybierz odpowiednią końcówkę dostosowaną do wieku użytkownika i typu irygacji jaką chcesz przeprowadzić (końcówka klasyczna - dla dorosłych, końcówka do łagodnej irygacji dla dzieci). Stań w pozycji lekko nachylonej nad umywalką, odwróć irygator do góry dnem i przyłóż końcówkę irygatora do otworu nosowego tak, aby uszczelnić otwór nosa. Pamiętaj, aby oddychać przez usta podczas płukania. Naciskaj palcem biały zawór na spodzie butelki, aby umożliwić jednostajny przepływ roztworu do płukania (120 ml na jeden otwór nosowy – dorośli; 60 ml na jeden otwór nosowy – dzieci), jednocześnie reguluj przepływ roztworu delikatnymi ruchami głowy w bok, aby roztwór który dostał się do nosa wypłynął drugim otworem nosowym. Powyższą czynność należy powtórzyć dla drugiego otworu nosowego. Nie połykaj roztworu. Po zakończeniu płukania oczyść nos przez wydychanie. Każdorazowo po zakończeniu płukania należy zdemontować butelkę do irygacji i dokładnie umyć wszystkie jej elementy – wypłukać czystą, gorącą wodą (do temperatury 100°C, nie wygotowuj elementów!). Następnie wszystkie elementy trzeba przetrzeć ręcznikiem papierowym, czystą ściereczką lub wysuszyć na powietrzu. Przechowywać w temp. pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. **Składniki**

Chlorek sodu, dwuwęglan sodu (zawartość netto saszetki: 3,2 g).

Zatoxin Rinse zestaw podstawowy zawiera:

zapakowane w torebkę zabezpieczającą: irygator z podziałką (max. poj. 300 ml) oraz zaworem do regulacji przepływu roztworu do irygacji, 1 nakrętka przykręcana na butelkę, 1 końcówka do klasycznej irygacji, 1 końcówka do łagodnej irygacji (dla dzieci); 12 saszetek w kartoniku (zawartość netto: 38,4 g) z proszkiem do sporządzenia roztworu do płukania nosa i zatok, instrukcją użytkowania. **Ważne**

PRZECIWWSKAZANIA:

Nadwrażliwość (alergia) na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego. Całkowita blokada nosa uniemożliwiająca wydostanie się roztworu. Nie stosować u osób, u których występuje poważne krwawienie z nosa. Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, zwłaszcza mokrych, nie zagojonych ran po zabiegach chirurgicznych. Nie stosować w infekcjach ucha spowodowanych przez np. zapalenie ucha, lub zatkanie ucha spowodowane przez zalegającą woskowinę. Nie stosować u osób z zaburzeniami równowagi. W przypadku przebytej operacji ucha, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Galeria

ZATO(IN) RINSE
 ŁATWA I BEZPIECZNA IRYGACJA

UNIKALNA BUTELKA
 = bezpieczna irygacja nosa i zatok z wypływem grawitacyjnym

12 saszetek
 dla dorosłych i dzieci od 4 roku życia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ZATO(IN) RINSE
 ŁATWA I BEZPIECZNA IRYGACJA

Specjalnie zaprojektowana butelka z wypływem grawitacyjnym umożliwia precyzyjne płukanie nosa i zatok pod stałym ciśnieniem.

- oczyszcza
- nawilża
- udrażnia nos i zatoki

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ZATO(IN) RINSE

atrasymetyczna irygacja – unikalna konstrukcja irygatora, wypływ pod stałym łagodnym ciśnieniem

dwa końcówki w zestawie (dla dzieci i dorosłych)

dwie sale – działają antyseptycznie, upłynniają i rozrzedzają wydzielinę

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ZATO(IN) RINSE

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Łagodzenie objawów chorób nosa i zatok, takich jak:

- uczucie zatkanego nosa
- zaleganie wydzieliny w jamach nosa i zatok
- ucisk w okolicy nosa i zatok
- suchość błony śluzowej nosa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ZATO(IN) RINSE

Unikalna konstrukcja irygatora i końcówek pozwala na oczyszczenie jam nosa i zatok w skuteczny i bezpieczny sposób zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Częstotliwość stosowania zestawu

Płukanie nosa i zatok przeprowadzić 1-2 razy dziennie lub wg wskazań lekarza. Profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

od 4 roku życia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ZATO(IN) RINSE

JAK BEZPIECZNIE PRZEPROWADZIĆ IRYGACJĘ NOSA I ZATOK?

1. Przygotowanie roztworu
2. Przygotowanie irygatora
3. Włożenie irygatora do nosa
4. Wypływ roztworu
5. Wydmuchanie roztworu
6. Wydmuchanie roztworu

Sposób użycia znajdziesz w Instrukcji używania dołączonej do opakowania.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.