

ZESTAW do płukania nosa i zatok APTEO 1 butelka + 12 saszetek



Cena: 17,45 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 1 but. (+ 12 sasz.) |
| Postać | - |
| Producent | SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

OpisZESTAW do płukania nosa i zatok APTEO 1 butelka + 12 saszetekApteo Zestaw do płukania zatok i nosa udrożnia i oczyszcza nos oraz zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie infekcji.**Wskazania do stosowania:**Zaleca się stosowanie w prewencji i objawowym leczeniu nosa i zatok, głównie w przypadku: nieżytu nosa różnego pochodzenia; utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok; przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok.**Sposób użycia**Produkt może być używany przez dzieci od 4 roku życia.Płukanie przeprowadzić 1-3 razy dziennie lub według wskazań lekarza.W celach profilaktycznych stosować 2-3 razy w tygodniu.**Ważne**PrzeciwwskazaniaNie stosować w przypadku otwartych, niezagojonych ran w nosie, w szczególności po operacjach. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki wyrobu. Zestawu nie powinny używać osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha. Nie stosować w przypadku problemów z równowagą lub w sytuacji występowania poważnego krwawienia z nosa. Po operacjach laryngologicznych, przed użyciem skonsultować się z lekarzem. W przypadku chorób objawiających się zwężeniem dróg oddechowych (np. astma, zapalenie oskrzeli itp.) przed zastosowaniem wyrobu należy skonsultować z lekarzem.**Skład**Chlorek sodu Ph.Eur.