

ZIAJA MINTPERFEKT Klej do protez zębowych 40 g



Cena: 11,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

WskazaniaZIAJA MINTPERFEKT Klej do protez zębowych 40 gBardzo mocny, nie zawiera cynku, miętowy smak, klej mocująco-uszczelniający**Działanie**Właściwości:bezbardwy klejbardzo mocnynie zawiera cynkuposiada miętowy aromat**Działanie**:mocuje i uszczelnia protezę zębową do 12 godzinzapewnia bardzo mocne utrzymanie protezyzapobiega przedostawaniu się resztek pokarmu pod protezęwspomaga higienę jamy ustnej, zapewnia świeży oddech**Sposób użycia**Przed nałożeniem protezy oczyścić jamę ustną i przepłukać wodą.Na umytą i osuszoną protezę nanieść klej w postaci około 5mm pasków, w odpowiedniej odległości od krawędzi protezy, jak pokazano na rysunku.Należy zacząć od wydozowania mniejszej ilości kleju, aby zapobiec wypłynięciu nadmiaru kleju spod protezy. Może okazać się koniecznym przeprowadzenie kilku prób, w celu ustalenia optymalnej ilości kleju.Założyć protezę, docisnąć i przygryźć na kilka sekund.Można stosować tak często, jak to konieczne.