


ZUMA ŚWIETLIK PURE krople do oczu 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.07.2024

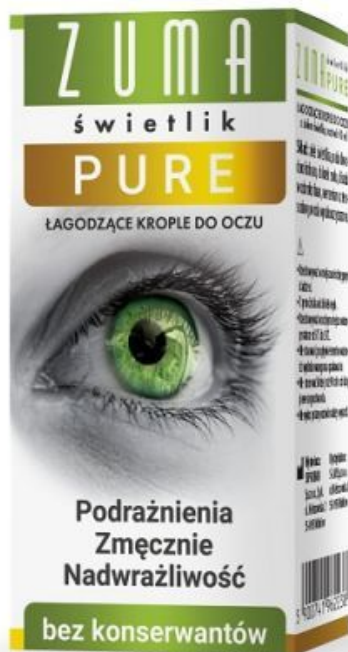

Cena: 2,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Postać	krop.do oczu
Producent	S-LAB SP. Z O. O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

WłaściwościZUMA ŚWIETLIK PURE bez konserwantów ŁAGODZĄCE KROPLE do oczu z zieleń światlika, roztwór ZUMA ŚWIETLIK PURE to odświeżające i łagodzące krople do oczu zawierające zieleń światlika. Odświeżające, kojące i uspokajające właściwości zieleni światlika łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oczu.**Sposób użycia**Jak często można stosować krople ZUMA ŚWIETLIKA PURE?W razie potrzeby należy zakropić jedną kroplę do worka spojówkowego. Ponieważ krople ZUMA ŚWIETLIK PURE nie zawierają konserwantów, mogą być używane codziennie, również przez użytkowników wszystkich typów soczewek kontaktowych. Zwykle zakrapla się 3 - 4 razy dziennie po jednej kropli do worka spojówkowego każdego oka. Przy nasilonych dolegliwościach można zakraplać częściej.Instrukcja stosowania:Krople do oczu ZUMA ŚWIETLIK PURE należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego. Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Przed każdym użyciem zdjąć osłonkę zabezpieczającą z zakraplacza. Nie dotykać końcówki zakraplacza. Lekko odchylić głowę do tyłu. Butelkę trzymać otworem do dołu (pionowo). Dolną powiekę odciągnąć nieco do dołu, wkropić jedną kroplę do worka spojówkowego, naciskając butelkę. Po zakropleniu należy zamknąć powiekę i ruszając gałką oczną, rozprowadzić krople na powierzchni oka. Te same czynności powtórzyć dla drugiego oka. Po użyciu należy założyć osłonkę zabezpieczającą na zakraplacz. Podczas zakraplania trzeba uważać, by nie dotknąć końcówką zakraplacza powierzchni oka oraz powieki. Po zastosowaniu preparatu nie zakraplać / płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.**Ważne**Nie stosować dłużej niż 90 dni od daty pierwszego otwarcia.W przypadku używania innych leków okulistycznych, powinno upłynąć co najmniej 15 minut zanim zakroplimy oczy kroplami ZUMA ŚWIETLIK PURE.Preparat ten należy podawać jako ostatni.**Składniki**Zieleń światlika, sodu diwodorofosforan, chlorek sodu, disodu wodorofosforan, wersenian czterosodowy, woda wysokooczyszczona.**Producent**Wytwórca: SUPROBION Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kiełczowska 2, 55-095 MirkówDystrybutor: S-LAB Sp. z o.o., ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków